

ЛАРИНГОСКОПЫ

ДЕТАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



Батарейная / аккумуляторная рукоятка:

Возможно использование аккумуляторов или батареек за исключением LED 2,5 В

Металлическая рукоятка – двойная функция

- ① с аккумулятором = аккумуляторная рукоятка для зарядного устройства KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000
- ② с батарейками = батарейная рукоятка

104

C-РУКОЯТКА

- 1 держатель клинка
- 2 пружинистый контактный штырь (со стороны клинка)
- 3 контактная шайба
- 4 пружинистый контактный штырь (со стороны обычной / аккумуляторной батарейки)
- 5 батарейная / аккумуляторная рукоятка из хромированной латуни (рукоятка серия Эконом – из пластика)
- 6 металлическая крышка
- 7 крышка
- 8 аккумулятор
- 9 батарейки



C-РУКОЯТКИ

СТАНДАРТНЫЙ СВЕТ 2,5 В



Традиционные рукоятки:

- все рукоятки совместимы в соответствии с системами стандарта DIN ISO 7376
- легкая по весу конструкция, за отсутствием внутренней гильзы
- все KaWe стандартные рукоятки (маленькие и средние) имеют двойную функцию
 - с батарейками = батарейная рукоятка
 - с аккумулятором = аккумуляторная рукоятка для зарядки в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
- длительный срок использования аккумулятора (NiMH) – благоприятно для экологии

2,5 В

| Батарейная / аккумуляторная рукоятка | | Аккумуляторная батарейка | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| маленькая | средняя | маленькая | средняя |
| | | NiMH | NiMH |
| | | | |
| Ø 19 мм | Ø 28 мм | | |
| 2 Mignon (AA) | 2 Baby (C) | | |
| ● | ● | | |
| ● | ● | | |
| | | в компл. с | в компл. с |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

03.11000.711

03.11000.721

03.11100.711

03.11100.721

2,5 В

| Батарейная рукоятка | Эконом C |
|---|-----------------|
| большая | средняя / синяя |
| | |
| Ø 32 мм | Ø 30 мм |
| 2 Baby (C) | 2 Baby (C) |
| 03.11000.731 | 03.11001.721 |
| Не подлежат зарядке в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000 | |

заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000

количество и тип батареек (не входит в объем поставки!)

ЛАРИНГОСКОПЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ

Надёжное качество KaWe. Ежедневное применение во всём мире.

На протяжении многих лет традиционные/стандартные ларингоскопы являются одними из известных в ассортименте KaWe. Эти высококачественные инструменты доказали в ежедневной практике свою надёжность и долговечность. Наши стандартные рукоятки могут использоваться со всеми традиционными клинками (Макинтош, Миллер, Фореггер, Полио). Как и в вариантах F.O. – безпроблемная замена клинков и лёгкость управления Вам гарантированы. Наши ларингоскопы стандартного света доступны с клинком KaWe ФЛЭГЛАЙТ С. Мы расширили наш ассортимент одноразовыми металлическими клинками, которые мы предлагаем как Макинтош или Миллер с LED-лампами. Все типы клинков изготовлены из нержавеющей стали, совместимы, а многоразовые клинки подлежат стерилизации согласно инструкции по применению.



Зарядное устройство KaWe МедЧарж 4000
KaWe MedCharge® 4000 (▶208)



КЛИНКИ С



Макинтош С
Macintosh C

Размеры 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ▶▶108



КаВе ФЛЭПЛАЙТ С
KaWe FLAPLIGHT® C

Размеры 2 | 3 | 4 ▶▶111



Миллер С
Miller C

Размеры 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 ▶▶109



Эконом Макинтош С
Economy Macintosh C

Размеры 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ▶▶112



Фореггер С
Foregger C

Размеры 0 | 1 | 2 | 3 | 4 ▶▶110



Эконом Миллер С
Economy Miller C

Размеры 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 ▶▶113



Полио Макинтош С
Polio Macintosh C

Размеры 3 | 4 ▶▶111



одноразовый клинок
Макинтош С / Macintosh C

Размеры 0 | 1 | 2 | 3 | 4 ▶▶114



НОВИНКА

LED

ИЗ МЕТАЛЛА



одноразовый клинок
Миллер С / Miller C

Размеры 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 ▶▶115



НОВИНКА

LED

МАКИНТОШ С / MACINTOSH C

ТРАДИЦИОННЫЙ КЛИНОК



- из нержавеющей стали,
матовая поверхность предотвращает отражение
- вакуумная лампа
- освещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В
(в зависимости от лампы и размера клинка)
- стерилизация в соответствии с инструкцией
- совместимы в соответствии с DIN ISO 7376



108



0



1



2



3



4



5



Макинтош С

| Размер | Клинок Арт. | Длина | |
|--------|----------------|--------|--------|
| | | a [мм] | b [мм] |
| 0 | 03.12010.602 | 79 | 13 |
| 1 | 03.12010.612 | 93 | 20 |
| 2 | 03.12010.622 | 112 | 20 |
| 3 | 03.12010.632 | 130 | 23 |
| 4 | 03.12010.642 | 155 | 25 |
| 5 | 03.12010.652 | 175 | 23 |

Источник света для традиционных многоугольных клинков (совместим)


| | | |
|--|---|--|
| 2,5 В Вакуумная лампа упаковочная единица = 6 шт. | для клинков следующих размеров: | для клинков следующих размеров: |
| | 00 - 1  | 2 - 5  |
| | 12.75126.003 (28958) | 12.75127.003 (28959) |

МИЛЛЕР С / MILLER C

ТРАДИЦИОННЫЙ КЛИНОК



- из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение
- вакуумная лампа
- освещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка)
- стерилизация в соответствии с инструкцией
- совместимы в соответствии с DIN ISO 7376

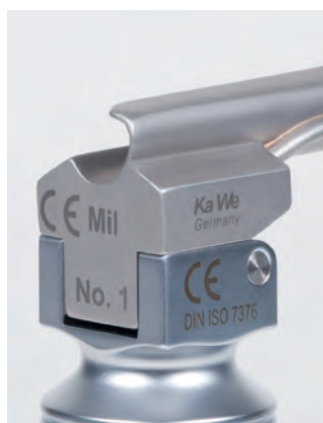

00



0



1



2



3




4



| Миллер С | | | |
|----------|----------------|--------|--------|
| Размер | Клинок Арт. | Длина | |
| | | a [мм] | b [мм] |
| 00 | 03.12020.592 | 65 | 12 |
| 0 | 03.12020.602 | 77 | 11 |
| 1 | 03.12020.612 | 102 | 11 |
| 2 | 03.12020.622 | 153 | 13 |
| 3 | 03.12020.632 | 195 | 13 |
| 4 | 03.12020.642 | 205 | 16 |


ФОРЕГГЕР С / FOREGGER C

ТРАДИЦИОННЫЙ КЛИНОК

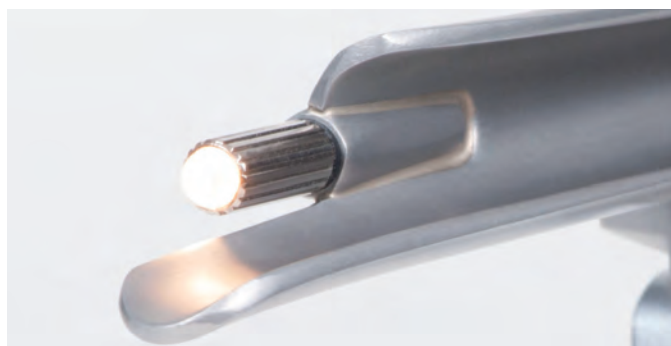

- из нержавеющей стали,
матовая поверхность предотвращает отражение
- вакуумная лампа
- освещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В
(в зависимости от лампы и размера клинка)
- стерилизация в соответствии с инструкцией
- совместимы в соответствии с DIN ISO 7376

110

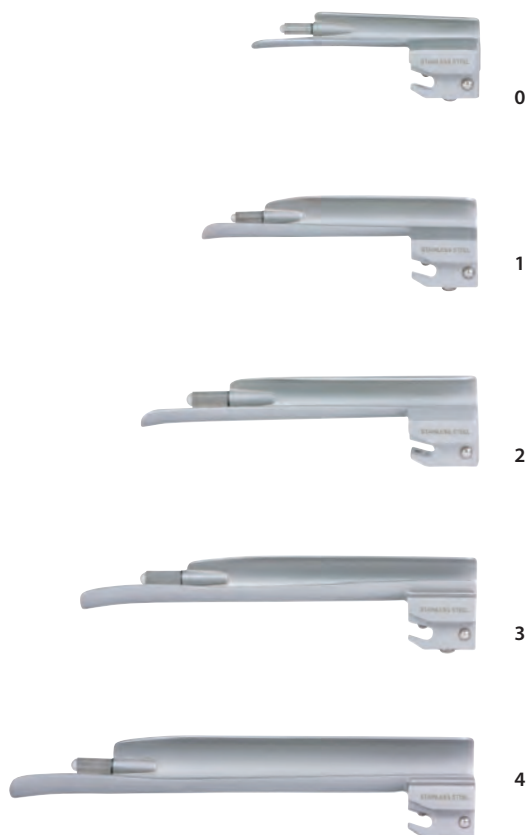

| Фореггер С | | | |
|------------|--------------|--------|--------|
| Размер | Клинок | Длина | |
| | Арт. | a [мм] | b [мм] |
| 0 | 03.12030.602 | 77 | 12 |
| 1 | 03.12030.612 | 92 | 14 |
| 2 | 03.12030.622 | 112 | 15 |
| 3 | 03.12030.632 | 132 | 16 |
| 4 | 03.12030.642 | 157 | 20 |

КаWe ФЛЭПЛАЙТ С / КаWe FLAPLIGHT® С

МАКИНТОШ КЛИНОК, ТРАДИЦИОННЫЙ



Подвижный и до 60° сгибаемый наконечник клинка облегчает поднятие надгортанника и даёт возможность лучшего обзора при анатомически сложной интубации.

Хороший обзор и несильное давление на рукоятку уменьшает риск травмирования гортани и зубов. Замена лампы производится без труда и самостоятельно.



| КаWe ФЛЭПЛАЙТ С Макинтош | | | |
|--------------------------|--------------|--------|--------|
| Размер | Клинок | Длина | |
| | Арт. | a [мм] | b [мм] |
| 2 | 03.12050.622 | 100 | 21 |
| 3 | 03.12050.632 | 130 | 25 |
| 4 | 03.12050.642 | 155 | 27 |

111

ПОЛИО МАКИНТОШ С | POLIO MACINTOSH С

ТРАДИЦИОННЫЙ КЛИНОК

Улучшенное, облегченное применение у тучных пациентов.
Дополнительная характеристика см. Макинтош С.



| Полио Макинтош С | | | |
|------------------|--------------|--------|--------|
| Размер | Клинок | Длина | |
| | Арт. | a [мм] | b [мм] |
| 3 | 03.12060.632 | 130 | 25 |
| 4 | 03.12060.642 | 150 | 25 |

ЭКОНОМ МАКИНТОШ С | ECONOMY MACINTOSH C



ТРАДИЦИОННЫЙ КЛИНОК



- из нержавеющей стали, матовая поверхность, крепкий термопластиковый крепеж, продолжительность эксплуатации идентична цельнометаллическим
- вакуумная лампа
- освещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка)
- соответствует экологическим требованиям, рентабельный и доступный по цене
- стерилизация в соответствии с инструкцией
- совместимы в соответствии с DIN ISO 7376



112

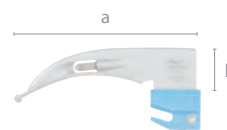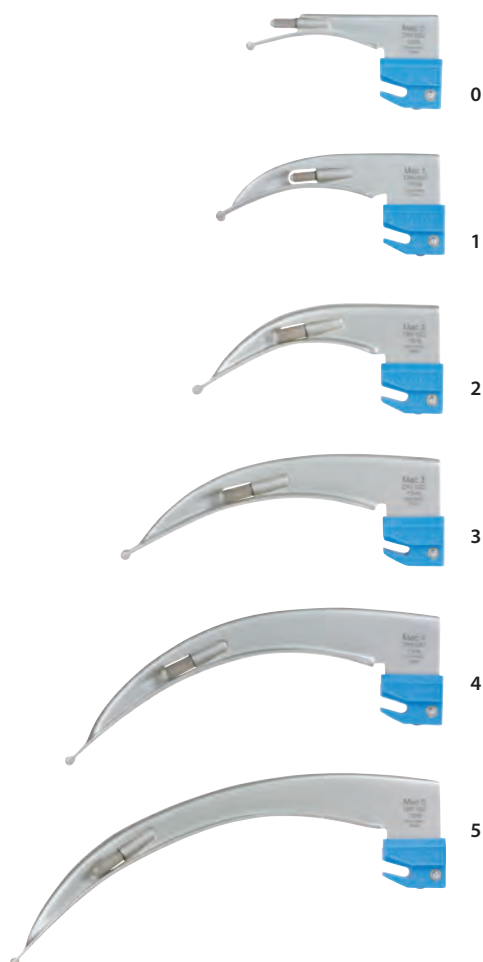

| Эконом Макинтош С | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|
| Размер | Клинок | Длина | |
| | Арт. | a [мм] | b [мм] |
| 0 | 03.12011.602 | 80 | 18 |
| 1 | 03.12011.612 | 92 | 20 |
| 2 | 03.12011.622 | 100 | 25 |
| 3 | 03.12011.632 | 130 | 25 |
| 4 | 03.12011.642 | 155 | 27 |
| 5 | 03.12011.652 | 175 | 27 |

ЭКОНОМ МИЛЛЕР С | ECONOMY MILLER C


ТРАДИЦИОННЫЙ КЛИНОК



- из нержавеющей стали, матовая поверхность, крепкий термопластиковый крепеж, продолжительность эксплуатации идентична цельнометаллическим
- вакуумная лампа
- освещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка)
- соответствует экологическим требованиям, рентабельный и доступный по цене
- стерилизация в соответствии с инструкцией
- совместимы в соответствии с DIN ISO 7376



113

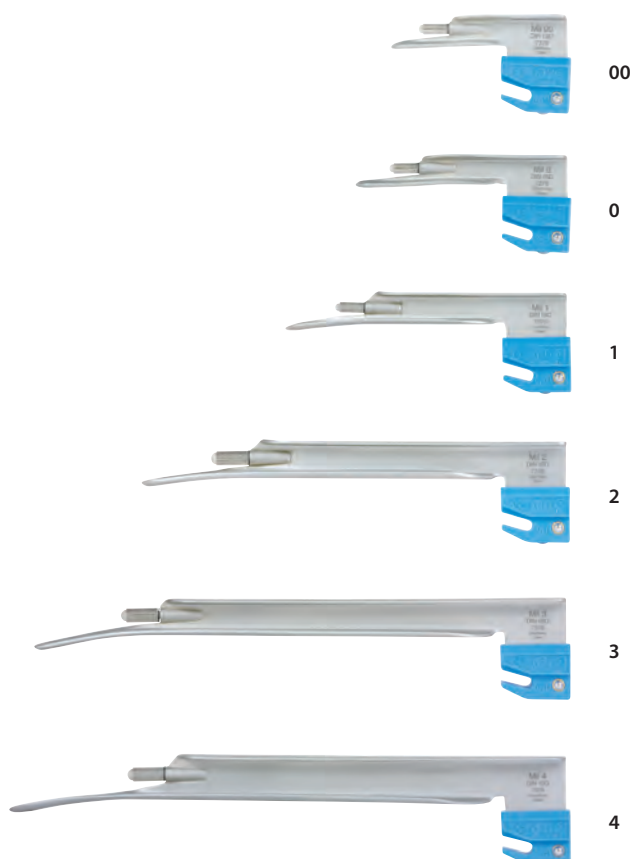

| Эконом Миллер С | | | |
|-----------------|--------------|--------|--------|
| Размер | Клинок | Длина | |
| | Арт. | a [мм] | b [мм] |
| 00 | 03.12021.592 | 67 | 12 |
| 0 | 03.12021.602 | 79 | 12 |
| 1 | 03.12021.612 | 105 | 12 |
| 2 | 03.12021.622 | 160 | 15 |
| 3 | 03.12021.632 | 200 | 14 |
| 4 | 03.12021.642 | 210 | 18 |

ОДНОРАЗОВЫЕ КЛИНКИ ИЗ МЕТАЛЛА



МАКИНТОШ С MACINTOSH C

для C рукояток

НОВИНКА

LED

без латекса

- из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение
- предназначен для оказания неотложной мед. помощи
- светосильная LED-лампа с белым однородным светом
- интенсивность света на кончике клинка: > приibl. 6.000 люкс / 2,5 В
- высокий уровень защиты, предотвращающий перекрестную инфекцию
- безопасный механизм блокировки замка при помощи двух фиксирующих шариков
- клинок имеет небольшой вес
- совместимы в соответствии с DIN ISO 7376
- невозможно использование с аккумуляторной батареей 2,5 В
- одноразовые, не подлежат стерилизации
- упакованы в практичной упаковке Tyvek®



114



0



1



2



3




4



| Макинтош С | | одноразовые клинки | |
|---------------------|---|--------------------|--------|
| Размер | из нержавеющей стали, нестерильный, упакован поштучно | Длина | |
| | | Арт. | а [мм] |
| 0 | 03.14010.602 | 82 | 15 |
| 1 | 03.14010.612 | 94 | 21 |
| 2 | 03.14010.622 | 103 | 21 |
| 3 | 03.14010.632 | 134 | 22 |
| 4 | 03.14010.642 | 156 | 24 |
| упаковочная единица | 10 шт. | | |

ОДНОРАЗОВЫЕ КЛИНКИ ИЗ МЕТАЛЛА

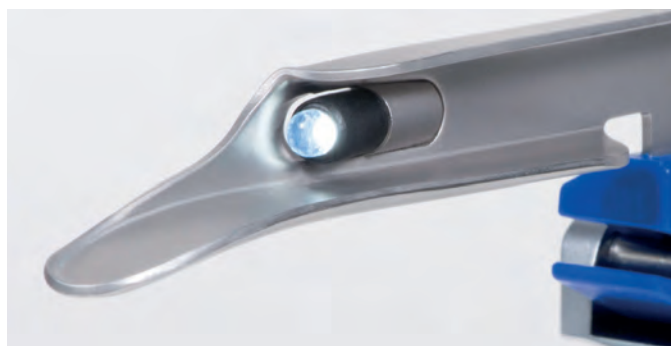

МИЛЛЕР С MILLER C

для С рукояток

НОВИНКА

LED

без латекса



- из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение
- предназначен для оказания неотложной мед. помощи
- светосильная LED-лампа с белым гомогенным светом
- интенсивность света на кончике клинка: > приibl. 6.000 люкс / 2,5 В
- высокий уровень защиты, предотвращающий перекрестную инфекцию
- безопасный механизм блокировки замка при помощи двух фиксирующих шариков
- клинок имеет небольшой вес
- совместимы в соответствии с DIN ISO 7376
- невозможно использование с аккумуляторной батареей 2,5 В
- одноразовые, не подлежат стерилизации
- упакованы в практичной упаковке Tyvek®

115



| Миллер С | | одноразовые клинки | |
|---------------------|---|--------------------|--------|
| Размер | из нержавеющей стали, нестерильный, упакован поштучно | Длина | |
| | | Арт. | а [мм] |
| 00 | 03.14020.592 | 68 | 14 |
| 0 | 03.14020.602 | 81 | 14 |
| 1 | 03.14020.612 | 108 | 14 |
| 2 | 03.14020.622 | 160 | 16 |
| 3 | 03.14020.632 | 200 | 18 |
| 4 | 03.14020.642 | 213 | 20 |
| упаковочная единица | 10 шт. | | |

АКСЕССУАРЫ

ПРАКТИЧНЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ

Оснащение для любых ситуаций. С практичным кейсом для ларингоскопа Вы приобретаете одновременно все необходимые клинки и аксессуары, готовые к немедленному использованию в экстренных случаях. Наш кейс для ларингоскопа доступен в различных вариантах. Набор в сером KaWe кейсе хорошо укомплектован, надежен и является незаменимым

помощником для врачей и сотрудников скорой помощи. Альтернативой кейсу для ларингоскопа может служить небольшая KaWe сумка скорой помощи. Эта оптимальная для транспортировки сумка имеет отсек для рукоятки, а также отсек для четырех клинков.

жесткий кейс для ларингоскопа

для 3-х клинков
и 1-ой рукоятки

используется для (размер клинка):
Макинтош (0, 1, 2, 3, 4)
Миллер (00, 0, 1)
Форэггер (0, 1)

прибл. Д 23 x Ш 19 x В 5 см

жесткий кейс, отдельно

Арт. 03.90001.261



жесткий кейс для KaWe ФЛЭПЛАЙТ ларингоскопа

для 1 KaWe ФЛЭПЛАЙТ клинка,
1-ой рукоятки и 2-х батареек

используется для (размер клинка):
KaWe ФЛЭПЛАЙТ (3, 4)

прибл. Д 27,5 x Ш 23,5 x В 8 см

жесткий кейс, отдельно

Арт. 03.90055.261



жесткий кейс для ларингоскопа

для 5-и клинков
и 1-ой рукоятки

используется для (размер клинка):
Макинтош (0, 1, 2, 3, 4, 5)
Миллер (00, 0, 1)
Форэггер (0, 1)

прибл. Д 27,5 x Ш 23,5 x В 8 см

жесткий кейс, отдельно

Арт. 03.90002.261



жесткий кейс для KaWe ФЛЭПЛАЙТ ларингоскопа

для 2-х KaWe ФЛЭПЛАЙТ клинков
и 1-ой рукоятки

используется для (размер клинка):
KaWe ФЛЭПЛАЙТ (3, 4)

прибл. Д 27,5 x Ш 23,5 x В 8 см

жесткий кейс, отдельно

Арт. 03.90051.261



жесткий кейс для ларингоскопа

для 7-и клинков
и 1-ой рукоятки

используется для (размер клинка):
Макинтош (2, 3, 4)
Миллер (0, 1, 2, 3)
Форэггер (0, 1, 2, 3)

прибл. Д 34 x Ш 27,5 x В 8,5 см

жесткий кейс, отдельно

Арт. 03.90004.261



Бокс из картона для ларингоскопа

для 4-х клинков
и 1-ой рукоятки

используется для (размер клинка):
Макинтош (0, 1, 2, 3, 4)
Миллер (00, 0, 1)
Форэггер (00, 0, 1)

прибл. Д 23,5 x Ш 19 x В 3,5 см

бокс, отдельно

Арт. 03.90103.002



Сумка экстренной помощи

для макс. 4-х клинков
и 1-ой рукоятки

цвет: синий

прибл. Д 19 x Ш 11 x В 6,5 см

сумка экстренной помощи, отдельно

Арт. 03.90003.001 (28805)



ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

1 РУКОЯТКА + 3 КЛИНКА

ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ НАБОР С

Эконом Макинтош С

▶▶105



▶▶112


03.12011.622 **2**


03.12011.632 **3**


03.12011.642 **4**



С 2,5 В
для взрослых

| | | | |
|--|---|------------|---------------------|
| Батарейная рукоятка серии Эконом С (средняя) 03.11001.721 | КлинокРазмер Эконом Макинтош С 2 Эконом Макинтош С 3 Эконом Макинтош С 4 | поставка в | набор Арт. |
| ● | ● | ☐ | 03.51022.002 |

*Источник света: для традиционных клинков **Размер 00 - 1** Арт. 12.75126.003 (28958), **Размер 2 - 5** Арт. 12.75127.003 (28959) ▶▶206

117

Макинтош С

▶▶105



▶▶108


03.12010.622 **2**


03.12010.632 **3**


03.12010.642 **4**



С 2,5 В
для взрослых

| | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| Батарейная-/аккумуляторная рукоятка С (средняя) 03.11000.721 | КлинокРазмер Макинтош С 2 Макинтош С 3 Макинтош С 4 | поставка в | набор Арт. |
| ● | ● | ☐ | 03.51020.011 |




*Источник света: для традиционных клинков **Размер 00 - 1** Арт. 12.75126.003 (28958), **Размер 2 - 5** Арт. 12.75127.003 (28959) ▶▶206


☐ бокс из картона, отдельно / Арт. 03.90103.002 ☐ кейс отдельно / Арт. 03.90001.261
 ⚡ заряжается в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe MedCharge 4000 / KaWe MedCharge® 4000



НЕОНАТАЛОГИЯ

ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ НАБОР С


1 РУКОЯТКА + 3 КЛИНКА

| Миллер С | |
|---|---|
| <p>▶▶ 105</p>  | <p>▶▶ 109</p> <p>03.12020.592 00</p> <p>03.12020.602 0</p> <p>03.12020.612 1</p> |




| С 2,5 В | | неонатология | |
|---|---|---|---------------------|
| <p> Батарейная/аккумуляторная рукоятка АА (маленькая) 03.11000.711</p> | <p>Клинок Размер</p> <p>Миллер 00</p> <p>Миллер 0</p> <p>Миллер 1</p> | <p>поставка в</p> | <p>набор Арт.</p> |
| | |  | 03.51120.011 |


*Источник света: для традиционных клинков **Размер 00 - 1** Арт. 12.75126.003 (28958), **Размер 2 - 5** Арт. 12.75127.003 (28959) ▶▶ 206





ПЕДИАТРИЯ


1 РУКОЯТКА + 3 КЛИНКА

| Макинтош С | | Миллер С | |
|---|---|--|--|
| <p>▶▶ 105</p>  | <p>▶▶ 108</p> <p>03.12010.612 1</p> <p>03.12010.622 2</p> | <p>▶▶ 109</p> <p>03.12020.602 0</p> | |



| С 2,5 В | | педиатрия | |
|--|--|---|---------------------|
| <p> Батарейная/аккумуляторная рукоятка С (средняя) 03.11000.721</p> | <p>Клинок Размер</p> <p>Миллер С 0</p> <p>Макинтош С 1</p> <p>Макинтош С 2</p> | <p>поставка в</p> | <p>набор Арт.</p> |
| | |  | 03.51720.011 |






*Источник света: для традиционных клинков **Размер 00 - 1** Арт. 12.75126.003 (28958), **Размер 2 - 5** Арт. 12.75127.003 (28959) ▶▶ 206




ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ + ПЕДИАТРИЯ

ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ НАБОР С

1 РУКОЯТКА + 7 КЛИНКОВ

| Макинтош С | Миллер С | Источник света | |
|---|--|---|--|
| <p>▶▶ 105</p>  | <p>▶▶ 108</p>  <p>03.12010.622 2</p> <p>03.12010.632 3</p> <p>03.12010.642 4</p> | <p>▶▶ 109</p>  <p>03.12020.602 0</p> <p>03.12020.612 1</p> <p>03.12020.622 2</p> <p>03.12020.632 3</p> | <p>▶▶ 206</p> <p>для клинков следующих размеров 00 - 1</p>  <p>12.75126.003 (28958)</p> <p>для клинков следующих размеров 2 - 5</p>  <p>12.75127.003 (28959)</p> |



| C 2,5 В | | для взрослых + педиатрия | | |
|---|---|--|--|--|
|  <p>Батарейная-/аккумуляторная рукоятка С (средняя) 03.11000.721</p> | <p>Клинок Размер</p> <p>Макинтош С 2</p> <p>Макинтош С 3</p> <p>Макинтош С 4</p> | <p>Клинок Размер</p> <p>Миллер С 0</p> <p>Миллер С 1</p> <p>Миллер С 2</p> <p>Миллер С 3</p> | <p>Вакуумная лампа 2,5 В</p> <p>1x 12.75126.003 (28958)</p> <p>1x 12.75127.003 (28959)</p> | <p>поставка в набор Арт.</p> |
| | | | | <p> 03.51790.011</p> |



***Источник света**
для традиционных многоразовых клинков

Вакуумная лампа 2,5 В (упаковочная единица = 6 шт.)

для клинков следующих размеров:

00 - 1



Арт. **12.75126.003** (28958)

для клинков следующих размеров:

2 - 5



Арт. **12.75127.003** (28959)

▶▶ 206